

Sehr geehrte Frau Waldek,

Wir freuen uns, Ihnen erstmalig unseren Newsletter zu unserem Produkt MATRIDERM® zusenden zu können. In dieser Ausgabe finden Sie folgende Informationen zu unserem Produkt:


- ⇒ MATRIDERM® außerhalb der Verbrennungsmedizin
- ⇒ Erfahrungen mit freiliegenden Sehnen und Knochen
- ⇒ Tipps für die Handhabung im OP

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Mit besten Grüßen



Markus Wiener

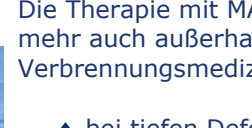

Hans-Peter Bernroider

MATRIDERM® außerhalb der Verbrennungsmedizin

Die Therapie mit MATRIDERM® etabliert sich mehr und mehr auch außerhalb des Indikationsbereiches der Verbrennungsmedizin:




- ◆ bei tiefen Defekten der Dermis in der Traumatologie; siehe [Fallbeispiel](#)
- ◆ bei freiliegenden Sehnen und Knochenstrukturen
- ◆ in der Dermatochirurgie
- ◆ bei Dermisdefekten aufgrund von Entfernung von Hauttumoren im Gesicht
- ◆ Herstellung einer besseren Gleitfähigkeit von Sehnen; siehe [Fallbeispiel](#)

Erfahrungen von Ärzten mit MATRIDERM®:



- ◆ dass freiliegende Sehnen und Knochen bis zu einer Breite von 1 bis max. 1,5 cm, mittels dem einzeitigen Verfahren des 1mm MATRIDERM®, gedeckt werden können.
- ◆ dass das Wundbett sauber und keimarm vorkonditioniert werden soll. Eine Vorkonditionierung kann mit der NPWT durchgeführt werden.
- ◆ dass die Fixation der Spalthaut durch Anlegung eines Verbandes empfohlen wird, der einen moderaten Druck auf die Applikationsstelle ausübt.
- ◆ dass mittels der NPWT die Fixation durchgeführt werden kann.

Tipps für die Handhabung im OP:

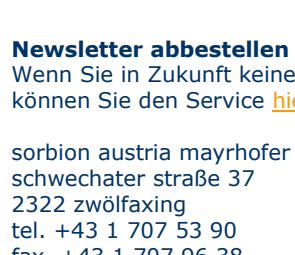

- ◆ Wird die Wunde mit einer desinfizierenden (z.B. jodhaltigen) Lösung behandelt, muss mittels NaCl 0,9% oder Ringerlösung das Wundbett gut gespült werden. Die Collagen Elastin Matrix (MATRIDERM®) kann ansonsten denaturieren.
- ◆ Nach Applikation des MATRIDERM®, welches am besten trocken aufgebracht wird, wird es mit einer Ringerlösung (Temperatur max. 37°C) befeuchtet.
- ◆ Luftblasen unter dem MATRIDERM® sollten ausgestrichen werden.
- ◆ Die besten Ergebnisse lassen sich mit ungemeshter Spalthaut erzielen.
- ◆ Mit einem leichten Überlappen der Spalthaut über den Wundrand hinaus können gute Ergebnisse erzielt werden.
- ◆ Weitere Anwendungstipps entnehmen Sie bitte der [Anleitung](#).

Unsere Produktspezialisten



Haben Sie Fragen zu MATRIDERM oder wünschen Sie einen Besuch von unseren Produktspezialisten?

Kontaktieren Sie für:

Wien, Kärnten, Burgenland, Tirol, Vorarlberg

Herrn [Markus Wiener](#), 0676/51 74 272

Niederösterreich, Steiermark, Salzburg, Oberösterreich

Herrn [Hans-Peter Bernroider](#), 0676/95 06 084

Newsletter abbestellen

Wenn Sie in Zukunft keinen Newsletter erhalten wollen, können Sie den Service [hier](#) abbestellen.

sorbion austria mayrhofer gmbh
schwechater straße 37
2322 zwölfaxing
tel. +43 1 707 53 90
fax. +43 1 707 96 38
web: www.sorbionaustria.at
web: www.medizinischer-honig.at
e-Mail: tanja.helm@sorbionaustria.at

Gesellschaftssitz: Zwölfaxing
Firmenbuchgericht: Landesgericht Schwechat
UID-Nr.: ATU61451869
© sorbion austria 2011. Alle Rechte vorbehalten.