



ANTIBACTERIAL DRESSING

# MEDIHONEY®

## Gel Sheet



### Medihoney™ Gel Sheet

ist ein steriler, nicht haftender Wundverband mit Medihoney™ antibakteriellem Honig (80%) und Natriumalginat (20%) für die Wundversorgung.

### Geeignet für

Einsatz auf leichten bis mittelstark exsudierenden Wunden.

### Wirkungen

- schafft ein feuchtes Wundmilieu und reduziert Traumen und Schmerzen beim Verbandwechsel
- schützt die Wunde gegen Krankheitserreger, einschließlich antibiotika-resistenter Stämme
- bewirkt schnelles und effektives autolytisches Debridement von belegten und nekrotischen Wunden
- rasche Beseitigung von schlechtem Geruch

### Indikationen

- Bein-/Fußulzera
- Dekubitus
- infizierte Wunden
- belegte Wunden
- übelriechende Wunden
- Transplantationsstellen
- Verbrennungen

### Optimale Wundbettvorbereitung

Medihoney™ Gel Sheet schützt die Wunde, indem es eine Barriere gegen Krankheitserreger in der Wunde einschließlich antibiotika-resistenter Stämme bildet und somit das Risiko von Infektionen vermindert. Durch das hohe osmotische Potenzial der Wundaufgabe wird die Exsudatbildung anfangs begünstigt, wodurch Bakterien, Endotoxine, Beläge und nekrotisches Gewebe aus der Wunde gespült werden und eine rasche Geruchstilgung eintritt. Das Resultat ist eine saubere Wunde, wodurch Entzündungen, Ödeme und Exsudation vermindert werden. Durch die Herstellung des optimalen Heilungsmilieus werden die Granulation und Epithelisierung gefördert.

### Bestellinformation

Produktname	Größe	Packung	Bestellnummer
Gel Sheet	5 x 5 cm	10 Stk.	MHGS 5X5
Gel Sheet	10 x 10 cm	10 Stk.	MHGS 10x10



ANTIBACTERIAL DRESSING

# MEDIHONEY®

## Gel Sheet



### Anwendungshinweise

- Wundränder mit Medihoney™ Barrier Cream schützen.
- Folien vor dem Auflegen auf die Wunde entfernen.
- Das Gel Sheet muss in vollständigem Kontakt mit dem Wundgrund sein.
- Für große bzw. tiefe Wunden können mehrere Gel Sheets neben- bzw. übereinander platziert werden.
- Alternativ: Wunde mit Medihoney™ antibakteriellem medizinischen Honig ausfüllen und danach mit dem Gel Sheet abdecken.
- Gel Sheet mit einem sterilen, nicht-adhärennten Verband abdecken, der ein ausreichendes Exsudatmanagement gewährleistet.

Die Wunde sollte bei jedem Verbandwechsel nach Standardmethoden gereinigt werden. Die Verbände können mit einer sterilen Schere geschnitten werden, bevor sie auf die Wunde gegeben werden.

### Häufigkeit des Verbandwechsels

Das Medihoney™ Gel Sheet sollte je nach Gelbildung bzw. Verdünnung durch das Wundexsudat **gewechselt** werden. Der Verband kann bei leichter Exsudatbildung bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden. Sollte eine Mazeration des Wundrandes auftreten, sollte der Gelverband häufiger gewechselt werden.

**Bei einer bestehenden Allergie gegen Honig oder Natriumalginat sollte das Gel Sheet nicht verwendet werden.**

### Vorsichtsmaßnahmen

- Aufgrund der Eigenschaften des Honigs können bei einigen Patienten Beschwerden auftreten wie ein stechender oder brennender Schmerz. Dies wird im Laufe der Zeit nachlassen. (Sollten die Beschwerden anhalten oder inakzeptabel sein, entfernen Sie den Verband und reinigen Sie die Wunde.)
- Das Gel Sheet wirkt optimal bei leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden.
- Trockene Wunden sollten idealerweise mit Medihoney™ antibakteriellem medizinischen Honig™ oder Medihoney™ antibakteriellem Wound Gel versorgt werden.
- Das Gel Sheet darf nicht über den Wundrand hinaus verwendet werden.