

Cutimed® Sorbion® Border

Hochabsorbierende Wundauflage, die schnell und zuverlässig fixiert und schmerzlos entfernt werden kann

**Sicheres
und einfaches
Exsudat-
management**

Cutimed®

Die Herausforderung des Exsudatmanagements

Exsudierende Wunden bergen verschiedene Risiken, die die Wundheilung hemmen können. Unter anderem können sie **aufquellen**.

Zwar werden hochabsorbierende Verbände für die Anwendung bei exsudierenden Wunden empfohlen. Jedoch sind sie in der Anwendung oft **kompliziert** und **zeitaufwendig**, da sie eine Sekundärfixierung benötigen.

Daher ist es wichtig, eine angenehme, sichere und einfach anzuwendende Lösung zu finden, um die klinische Wirksamkeit und den Patientenkomfort zu verbessern.

Eine hochabsorbierende Wundauflage mit neuer, stark haftender Silikonrand-Technologie für die schnelle, schmerzlose Anwendung

Patientenfreundlich


- Weniger Schmerzen beim Entfernen durch die hautfreundliche Silikontechnologie*

► Sanfte Fixierung

Anwenderfreundlich

- Sichere Fixierung durch Silikon-Hafttrand-Technologie
- Weniger Verbandswechsel durch HRT** für eine längere Wundruhe

► Zeit- und kostensparend

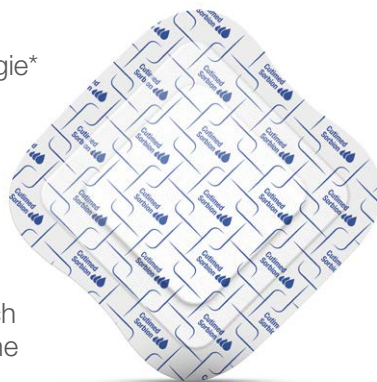

Schließt die Flüssigkeit zuverlässig ein

- Absorbiert die Wundflüssigkeit und schließt sie zuverlässig im hochabsorbierenden Kern ein
- Beseitigung von Hemmfaktoren für die Wundheilung, einschließlich Bakterien und Proteasen
- Fördert ein feuchtes Wundmilieu, das die körpereigene Wundheilung unterstützt

► Aufquellschutz

Wirksam unter Kompressionstherapie

- Schließt den Großteil des absorbierten Exsudats selbst unter Kompression ein

► Ermöglicht eine ganzheitliche Therapie

Cutimed® Sorbion® Border kann für mäßig bis stark exsudierende Wunden verwendet werden, zum Beispiel:

- Ulcus cruris
- Diabetisches Fußgeschwür
- Nässende Laparotomiewunden
- Dekubitus
- Hautfisteln
- Exulzerierende Karzinome
- Postoperative Wunddehiszenzen und ähnliche exsudierende Wunden

*Im Vergleich zu herkömmlichem Kleber

**Hydration Response Technology

Wirkmechanismus von Cutimed® Sorbion® Border




Cutimed® Sorbion® Border ist mit einer neuen, stark haftenden Silikonrand-Technologie versehen für:

- Eine sichere Haftung auf der Haut
- Eine hohe Atmungsfähigkeit
- Einen sanften, schmerzlosen Verbandswechsel
- Ein einfaches Re-positionieren
- Hautfreundlichkeit (Silikontechnologie)
- Duschfestigkeit

Entdecken Sie die nachgewiesene Wirksamkeit von Cutimed® Sorbion® Border für ein hervorragendes Exsudatmanagement


Absorption

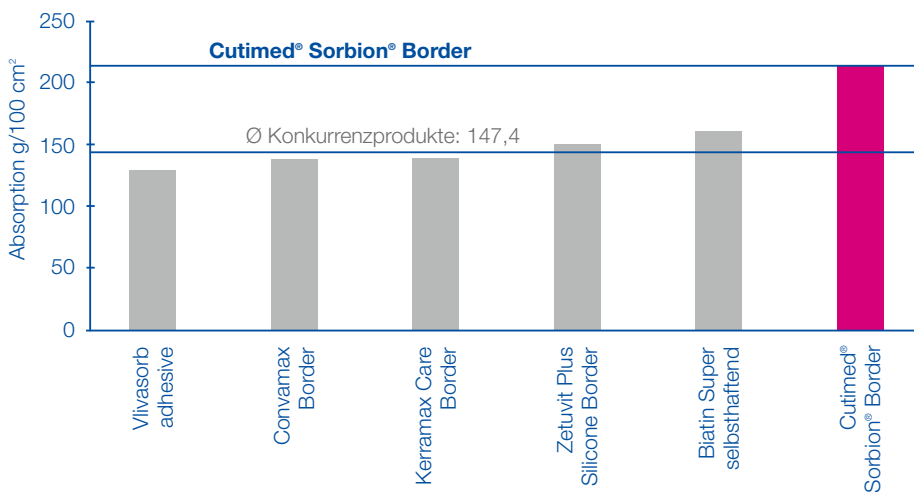

Mittel **48,6 %**

höhere Absorption als die genannten Konkurrenzprodukte

Retention

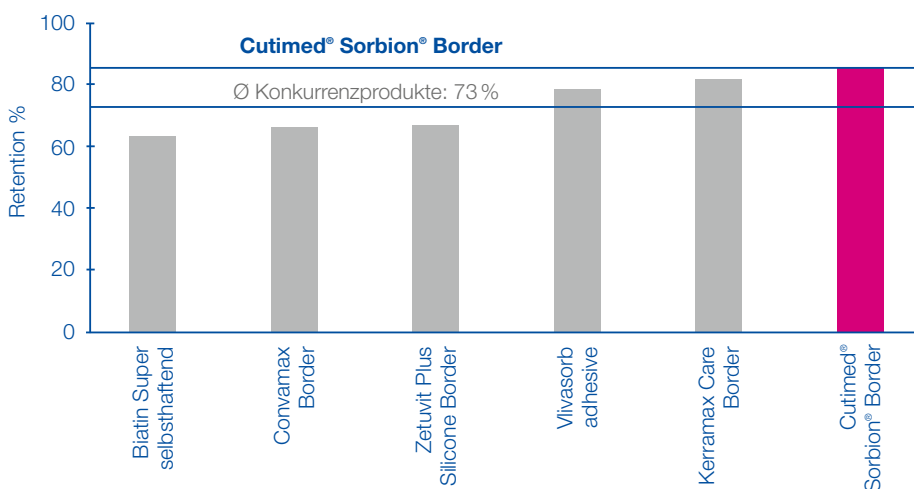

Mittel **15 %**

höhere Retention als die genannten Konkurrenzprodukte

Die Auswertung basiert auf DIN EN 13726-1:2002.

Der Test wurde vom unabhängigen Labor Surgical Material Testing Laboratory (S.M.T.L.) 2021 durchgeführt.

Für ein hocheffizientes Exsudatmanagement und ein sanftes Entfernen – wählen Sie Cutimed® Sorbion® Border!

Hochabsorbierende Wundauflage

- Hohe Absorptions- und Retentionsleistung
- Effizientes Wundexsudatmanagement auch unter Kompression
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu

Neue, stark haftende Silikonrand-Technologie

- Sichere und zuverlässige Fixierung
- Schmerzlose Anwendung und Entfernung
- Zeit- und kostensparend
- Kann während des Anbringens re-positioniert werden
- Duschfest



Cutimed® Sorbion® Border			
Bestell-Nr.	Größe	Wundpad-Größe	Menge pro Karton
71010-00	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10
71010-02	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10
71010-03	20 x 20 cm	15 x 15 cm	10
71010-04	10 x 23 cm	5 x 18 cm	10
71010-07	9 x 11 cm (oval)	4,5 x 7 cm	10
71010-08	19,5 x 22 cm (kreuzförmig)	5,5 x 6,5 cm	10



Cutimed®,
an Essity brand

Die Beratung und Bestellung der Artikel erfolgt über:

Sorbion Mayrhofer GmbH
Schwechater Straße 37
2322 Zwölfaxing, Österreich

Tel.: +43 1 707 53 90 - 0
Fax: +43 1 707 96 38
www.sorbionaustria.at